

SYNTEX - сийлър

Материал за запълване и запечатване на коренови канали

СЪСТАВ:

Епоксидна смола, аминок смола, неорганичен пълнител, калциев волфрамат, ексципиенти.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Продукта е предназначен само за дентална употреба.
- За постоянно запълване на канали на постоянни зъби с помощта на гутаперчови щифтове.
- Материалът може да се използва при всички техники за запълване на канали.
- Той е идеален за термични методи.

СВОЙСТВА

- Минимално свиване в процеса на втвърдяване на продукта;
- Перфектна адхезия, осигуряваща херметичност при запълването на канала;
- Отлична съвместимост;
- Хомогенна структура;
- Рентгеноконтрастен;
- Оптимално време за втвърдяване;
- Лесна и бърза апликация.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Запечатващата паста SYNTEX се предлага в двойна дозираща спринцовка в съотношение 1: 1.

Преди първата употреба, шприцнете малко количество от спринцовката на смесително блокче, за да сте сигурни, че и двете паста подавани едновременно се смесват на върха на спринцовката. Смесването на компонентите е възможно и без използване на смесителна канюла. За целта шприцвайте пастите в еднакво съотношение върху смесително блокче и ги миксирайте с помощта на инструмент до получаване на еднакъв цвят.

Подгответе, изплакнете и подсушете кореновия канал преди апликация. Поставете малко количество от SYNTEX на върха на пълнителя; бавно движете пълнителя в посока на апекса с минимални обороти и го извадете от канала при възможно най-ниски такива.

Въможна е апликация на SYNTEX паста върху предварително дезинфекциран и подсушен щифт. Поставете го в канала с постъпателно движение.

Допълнителните щифтове могат да бъдат поставени в канала посредством метода на латерална или вертикална кондензация с гутаперча.

Ако пулпната камера е замърсена със сийлър, препоръчва се почистване с Isopropyl Alcohol, за да се елиминира остатъка от неполимеризиращата паста.

Времето за втвърдяване на продукта е около 3 часа, стандартизиран по EN ISO 6876 -материали за кореново запечатване.

Скъсяването на времето на втвърдяване би могло да доведе до свиване и течливост на пълнежа. Ако при прелечение на канала е необходимо премахване на сийлъра, това е възможно посредством Canal Clean или Methylene Chloride.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага SYNTEX при пациенти чувствителни към някои от съставките на продукта.

ПРЕПОРЪКИ

- Използвайте кофердам по време на работа с продукта.
- Използвайте предпазни ръквици, очила и облекло. Предизвиква кожни раздразнения.
- Избягвайте контакт на SYNTEX с очи, лигавица и кожа. В случай на контакт изплакнете обилно с вода.
- Вреден при поглъщане. Токсичен за водни организми. Ако е погълнат - не предизвиквайте повръщане, пийте големи количества вода. Потърсете медицинска помощ.
- Избягвайте препресване на продукта през апекса тъй като това може да предизвика раздразнение на периапикалните тъкани.
- Препоръчва се употребата на рентген или ендометрична линия.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте в запечатана опаковка в помещения с температура от 2°C до 25°C, защитени от слънчева светлина. Пазете далеч от деца.
- Срокът на годност е отбелязан върху етикета на продукта. Той не се променя след като контейнера е отворен веднъж, при условие че се затваря внимателно всеки път след употреба.
- При затварянето на спринцовката избягвайте смесване на пастите от спринцовката с пасти останали върху капачето (бяло със жълто) Това може да доведе до полимеризация на материала и отварянето на спринцовката ще бъде невъзможно.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Двойна дозираща спринцовка в съотношение 1: 1
- Смесително блокче
- Смесителни канюли

Вносител: „МИПИС“ ООД – Варна

mipis@abv.bg
www.shop.mipis.com

Производител:
CERKAMED - Полша

гр. Варна
ул. "Генерал Цимерман" №55
тел/факс: 052 / 612 123
0888 / 015336

гр. Варна
ул. "Патриарх Евтимий" №35
тел/факс: 052 / 601 648
0889 / 595962

гр. София
ул. "Перник" 91
02 / 952 66 45
0882 / 508 239