

In Fibra

Лента за шиниране

Описание:

In Fibra е направена от дълги бели силно кристализирани полиетиленови влакна, които дават високо технически характеристики, идеални за дентална употреба. Специалната плетка дава възможност за чисто рязане и пълно подплатяване с всякакви течеливи смолисти композити, незапълнени адхезиви и акрилни смоли. Продуктът има 4 вида ширини в мм – 1, 2, 3 и 4.

Предназначение:

Използва се за, както следва:

- Пародонтално шиниране
- Ортодонтска ретенция
- Армиране на временни мостове
- Армиране на мостове и протези
- Изграждане и ретенция
- Създаване на ендодонтски щифт и пънче
- Армиране на фотополимерни мостове
- Временна стабилизация на изкуствени зъби

Инструкция за употреба:

Изтеглете нужното количество от In Fibra като използвате чисти пинцети.

Не докосвайте без ръкавици. Ръкавиците трябва да са без талк.

In Fibra може да бъде срязана като се използва специална лазерно наточена ножица.

Когато **In Fibra** се използва с композит тя трябва да е предварително напоена с бондинг.

Когато **In Fibra** се използва с акрилна пластмаса не трябва да е напоена с мономер.

Ръчно направеният продукт с **In Fibra** трябва да бъде изцяло покрит с композит. Ако смолият компонент е изчерпан Ви съветваме да използвате нов пласт, за да избегнете загуба на влакно.

Продуктът няма срок на годност, ако той се съхранява правилно и се предпазва от интензивна светлина и замърсявания.

Използва се с кофердам.

Фотополимеризира се зъб по зъб.

Производител: **Bioloren**

Вносител: **MiPlant** ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755,

www.miplant.bg; miplant@miplant.bg