

ПРЕДИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ВНИМАТЕЛНО

ПРОДУКТЪТ Е САМО ЗА СТОМАТОЛОГИЧНО ПОЛЗВАНЕ

MTA+

СЪСТАВ:

Калциев хидроксид и силикон, желязо, алуминий, натрий, калий, бисмут, магнезия, калциев фосфат.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Продукта е предназначен за използване по време на стоматологично лечение, като материал за запълване и реминерализация на коренови канали. При смесване с вода материала се втвърдява за 6-10 минути.

MTA+ е специално предназначен за следните случаи:

- Деминерализация на лезии на кореновия канал
- Ретроградно запълване на апекса на корена
- Пулпно капсулиране
- Пулпотомия
- При лечение на зъби с незавършено кореново развитие

Продуктът има реминерализиращ ефект върху твърдата зъбна тъкан, сигурно запечатва кореновия канал.

MTA+ не трябва да бъде използван като отделен или краен запечатващ материал.


Инструкции за употреба:

Поставете на смесителната подложка част от праха MTA+ от стъкленото шишенце.

Прибавете 1-2 капки от течността MTA+ използвайки пипетка.

Бъркайте в продължение на 30 секунди, докато достигнете консистенция на мокър пясък. Ако консистенцията на сместа е твърде гъста или ронлива прибавете още една капка течност (или дестилиран вода).

Апликирайте препарата посредством амалгамоносач.

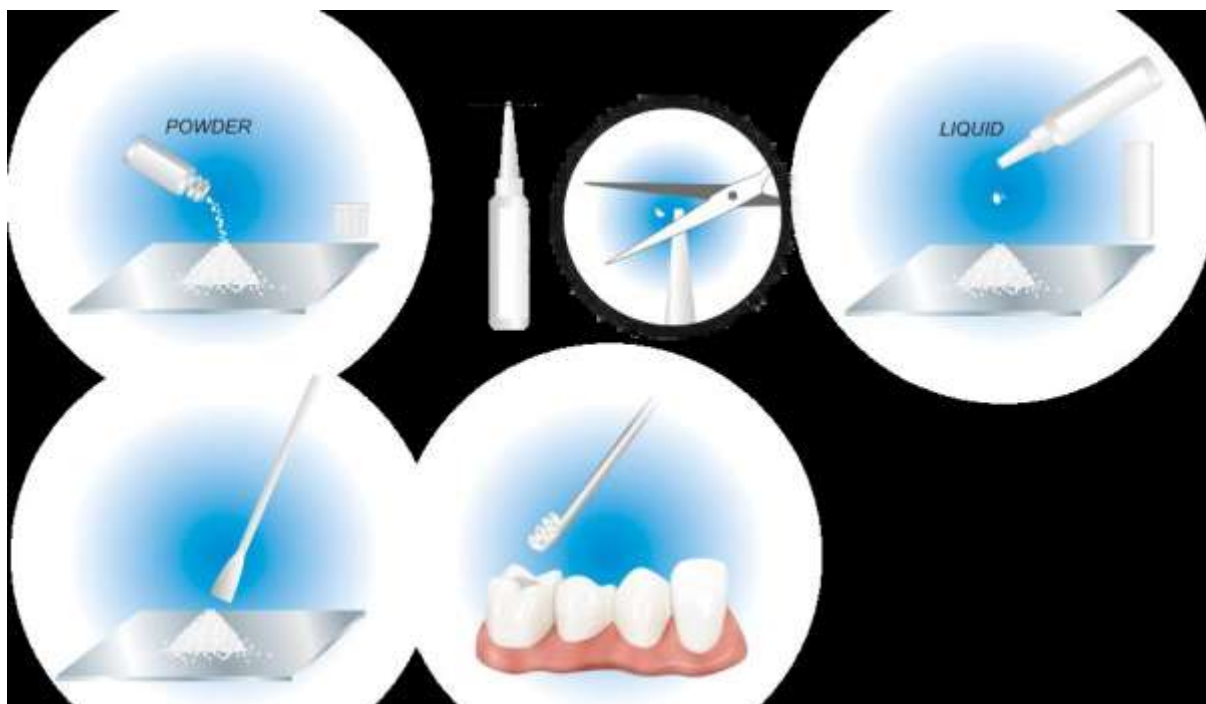

Използвайте препарата само когато острите симптоми отшумят, тъй като киселинната рН повлиява на втвърдяването на МТА+. МТА+ *прах* е дозиран за единични използване. Когато бъде смесен с МТА+ *течност* (или дистилирана вода), трябва да се използва в рамките на 10 минути. След изтичане на това време препарата не е годен за употреба поради напредналия стадий на втвърдяване на сместа.

Последно обновяване: 05.06.2012

Използвайте МТА+ *течност* до една година от първото и отваряне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте продукта на пациенти със свръхчувствителност към съставките му.

ВНИМАНИЕ:

Продукта може да причини увреждане на очите.

Причинява дразнене на лигавицата, кожата и очите.

В случай на контакт изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Случай на поглъщане не повръщайте и не се опитвайте да причините повръщане.

Пийте много вода и потърсете медицинска помощ.

По време на лечение е препоръчително да се използва платно за кофердам, еднократни ръкавици и предпазен шлем за очите.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте в оригиналната опаковка при температура под 25⁰С. Пазете от влага.

Съхранявайте на недостъпно за деца място. Датата на годност е обозначена на опаковката.

ТРЕТИРАНЕ НА ОПАКОВКАТА НА ПРОДУКТА:

Празната опаковка трябва да изхвърли на подходящо място.

ВНИМАНИЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ

МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА ДА 25⁰С

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ВЛАГА

ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Производител:

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Tel/fax 0048 15 842-35-85

ВНОСИТЕЛ:

Вносител:

„Мипис” ООД – Варна

mipis@abv.bg

www.mipis.com

Производител:

CERKAMED

Варна

ул. "Патриарх Евтимий" №35

тел/факс: 052 / 601 648

Варна

ул. "Генерал Цимерман" №55

тел/факс: 052 / 612 123

София

ул. "Перник" 91

02 / 952 66 45

0882 / 508 239; 0882 / 820 766

Последна промяна: 05.06.2012

Инструкция:

<http://cerkamed.pl/cms/MTA+%20EN.pdf>